

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird, soll einen zuverlässigen Atemschutz bieten und vor bestimmten luftgetragenen Partikeln und Staub schützen, Körperflüssigkeiten blockieren und so weiter.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Diese Maske, die mit "NR" gekennzeichnet ist, darf nicht für mehr als eine Schicht verwendet werden.
2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern, hinzufügen oder weglassen.
3. Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer Erkrankung oder Infektion nicht vollständig aus.
4. Verwenden Sie die Partikelhalbmaske nicht mit Gesichtsbehaarung oder anderen Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern können, die Anforderungen an eine Leckage werden nicht erfüllt.
5. Verwerfen und ersetzen Sie die Maske, wenn:
 - a) Die Maske wird entfernt, während sie sich in den kontaminierten Bereichen befindet.
 - b) Das Verstopfen der Maske verursacht Atembeschwerden.
 - c) Die Maske beschädigt wird.

EU-Type Examination Notified Body

Notified Body: SGS FIMKO OY


Address: Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

Notified Body No: 0598

Anleitung



1. Entfalten Sie die Maske und ziehen Sie die Bänder an beiden Enden um die Ohren herum und positionieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht mit dem verstellbaren Metallstreifen nach oben zeigend.

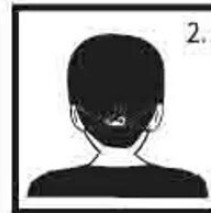

2. Befestigen Sie, wenn gewünscht, die Bänder in der dafür vorgesehenen Halterung hinter dem Kopf.



3. Pressen Sie den Metallstreifen leicht nach unten, um zu gewährleisten, dass die Maske sicher versiegelt und der Nasenform angepasst ist.



4. Drücken Sie die Maske leicht auf Ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen.

Lager- und Transportbedingungen

Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungstemperatur zwischen -30°C bis $+70^{\circ}\text{C}$, und relative Luftfeuchtigkeit $<80\%$, kein korrosives Gas, gute Belüftung.

Während des Transports von Feuchtigkeit, Licht und Wärme fernhalten.



Siehe Informationsbroschüre des Herstellers.



Temperaturbereich der Lagerbedingungen.



Maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen.



Einwegartikel

CE 0598

CE Kennzeichen und Nummer der NB