



Anleitung zur Verwendung

1. Klappen Sie die Maske auf.
 2. Positionieren Sie die Maske, so dass Mund und Nase bedeckt sind.
 3. Passen Sie die Ohrschlaufen so an, dass die Maske bequem sitzt.
 4. Drücken Sie die Maske vorsichtig an die Nase für einen dichten Sitz.
 5. Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus.
- Wenn Luft um Ihre Nase strömt, drücken Sie den Clip fester. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um eine bessere Passform zu erzielen. Überprüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske gut abdichtet.

Angemessene Verwendung	Professionelle / Staubschutz / Mikroorganismus Filterung
Bedingungen korrosive Gase	Halten Sie die Atemschutzmaske in der Displaybox bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungslagerbedingungen wie Temperatur zwischen -20 ° C bis + 30 ° C und relative Luftfeuchtigkeit <80%.
Waring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nicht verwenden, wenn Konzentrationen von Schadstoffen unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich sind. Es sollte noch bei den Warnhinweisen vor dem Einsatz der Ausrüstung in explosionsfähiger Atmosphäre gewarnt werden. 2. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn: a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten. 3. Ändern oder modifizieren Sie dieses Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise (außer wie in den Anweisungen angegeben). 4. Die Nutzungsdauer dieses Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte jedoch eine Schicht nicht überschreiten. Die Atemschutzmaske sollte früher 5. Der nicht richtige Sitz der Halbmaske kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen, ausgetauscht werden, wenn das Atmen schwierig wird.
Dauer der Haltbarkeit	Haltbarkeit beträgt drei Jahre ab Produktionsdatum



Prevent pollen



Prevent cascophen



Anti-smog



Saliva prevention

Supplier:

WENZHOU LEIKANG MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: Room 401, 4th floor, No.21 building, No.89

Fengfang Rd, Ouhai Economic Development Zone,

wenzhou City, Zhejiang Province, CHINA

Produktionsdatum

14/12/2020

DE141220GS-003

